



体重・身長の測定、カウプ指数の計算・判定結果のプリントアウトまでの機能を備えています。

6-001

Nアイデアル  
デジタルベビーテーブル  
M-5080LCD

¥1,280,000

体重と身長が一か所で集約的に測定でき能率的です。

- 体重と身長をデジタルで表示します。
- 正確でちらつきがありません。
- 風袋調整は、押しボタンのワンタッチでOKです。
- 身長表示はフットスイッチで固定できます。
- 測定結果がプリンターで印字されます。

TFTカラー液晶画面10.1インチは、測定値の表示が大きく見やすく、操作のしやすいパネルです。

■仕様

体重計/0~21kg、1g単位  
身長計/40~90cm、1mm間隔  
寸法/全体：W104×D73.5×H114.5cm  
マットレス：L96×W44cm

電源/AC100V 50~60Hz 20VA  
印字項目/日付、番号、体重(kg)、身長(cm)、カウプ指数  
重量/約90kg

◎計量法による検定済計量器使用





### 1. 体重測定

赤ちゃんを載せるだけで体重の自動測定をします。表示固定設定により赤ちゃんが動いても、マイコン機能で正確な体重を測定します。




### 2. 身長測定

赤ちゃんを寝かせたまま、左右のカーソルを動かし身長を測定します。表示は固定されます。また、フットスイッチによる測定の強制固定もできます。

### 3. カウプ指数の計算&自動判定

体重及び身長を測定すると自動的にカウプ指数を計算し、表示とともに判定表示欄の何れかのキャラクターを大きく表示します。肥満度の判定は、やせすぎ やせぎみ ふつう ふとりぎみ ふとりすぎ の5段階です。(判定表示のOFFもできます)

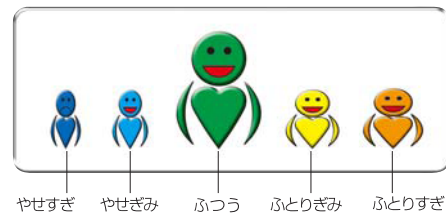

### 4. 測定結果を素早くプリントアウト



2016.03.04 14:05	
No	: 012346
性別	: 3 ヶ
身長	: 5.080 Kg
体重	: 56.0 cm
カウプ	: 16.2
判定	: フツウ

印字ボタンを押せば測定結果や日時・年齢等を素早くプリントし、記録の保管に役立ちます。高速印字で印刷音も静かです。またサーマルプリンタなのでインク交換は不要です。

## 6

## 体重・身長測定機器

## M-5080LCD仕様

## ●体重計 (計量器:内蔵分銅付重量級天秤/

GP-32KR経済産業省検定合格品)

ひょう量:31kg(計量器) 目盛:1g 使用範囲:5g~21kg

測定方式:電磁平衡式

## ●身長計

測定範囲:約40~90cm、1mm間隔

校正機構:校正点80cm

## ●表示部

表示装置:10.1インチ タッチパネル式TFTカラー液晶パネル

表示内容:日付・時刻 身長 体重 番号 カウプ指数 年齢  
判定表示キャラクター機能ボタン:年齢設定 ゼロ/風袋引き 表示固定設定 再測定  
判定表示ON/OFF 設定 印字 電源OFF

## ●プリンタ

印字方式:サーマルラインドット方式


印字内容:日付・時刻 番号 年齢 体重(kg) 身長(cm)  
カウプ指数 判定

印字速度:Max. 90mm/秒 印字用紙:58mm x 18.5m

## ●電源: AC 100V、50/60Hz 消費電力20VA

## ●寸法・重量: W104 x D73.5 x H114.5cm、約80kg

## ●寸法図 (単位: mm)

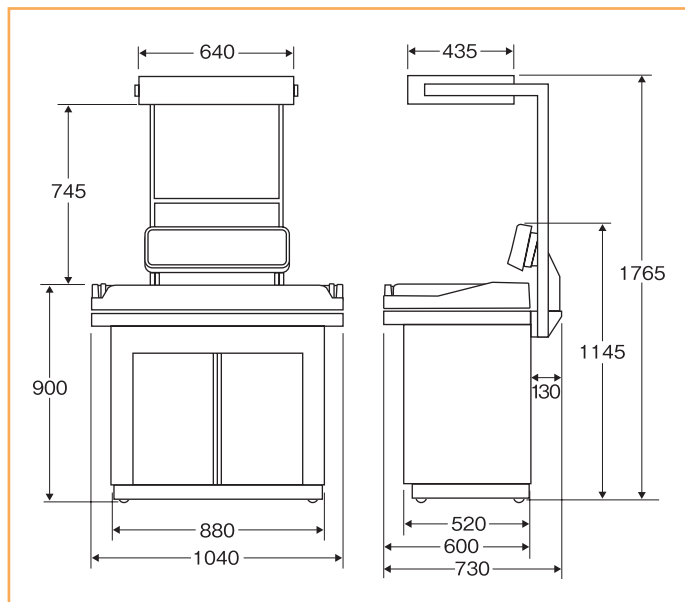

◎外観・仕様は改良等のため予告なく変更することがあります。

## ●別途販売品

6-110

Nアイデアル  
M-5080LCD 専用ウォーマー

¥358,000

測定中の赤ちゃんの体温を保ちます。

- 遠赤外線ヒーターにより、ベッド上の赤ちゃんを優しくあたためます。
- 温かさはダイヤルで自由に調節できます。
- 取り付けも簡単です。





### 身長計の付いた処置台

6-002

Nアイデアル  
身長計付処置台  
M-1000

¥350,000

分娩室、沐浴室、新生児室等狭い場所での計測、処置が便利にできます。

■コンパクトで使い易い

処置と計測が一か所で行え、場所を有効に使用出来ます。

■フリーなカーソル

児を中央に寝かせたまま、左右のカーソルを動かして測定できます。

■処置に便利な高さ

マットの位置は処置に疲れない高さです。

■仕様

身長計／測定範囲 40～90cm、2mm間隔

材 質／ベット部…ABS樹脂成型品

身長計…メタクリル樹脂

本体…鋼板焼付塗装

寸 法／W104×D60×H91cm

マットレス部 96×44cm

付属品／ビニールカバー付 ウレタンマットレス 1

■別途販売品

6-121


専用ウォーマー

¥365,000 (取付金具代含)

ご希望により取り付け出来ます。

M-5080LCD型用と同じです。(左図参照)



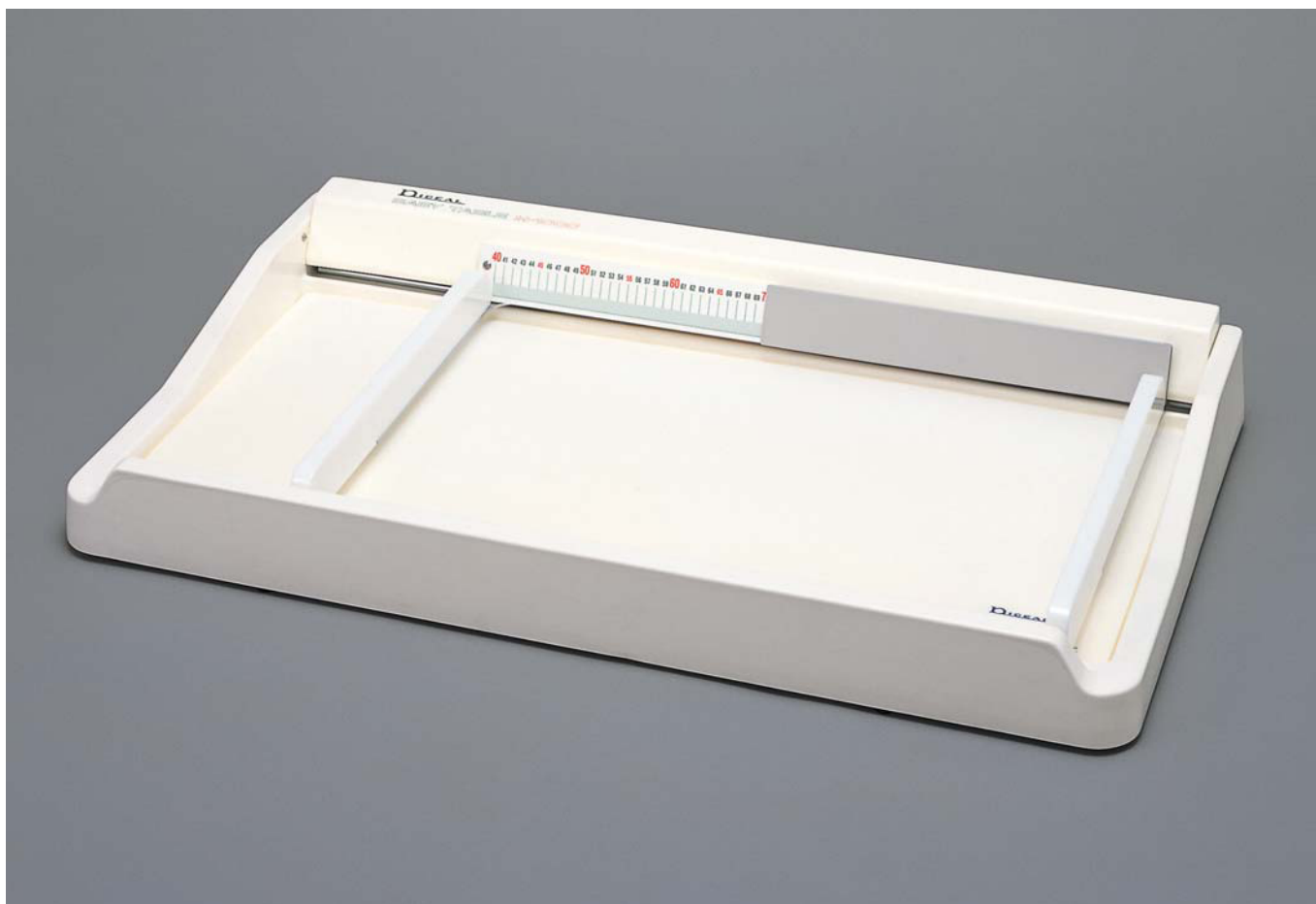

### キャビネットが不要な身長計 (又は、キャビネットの無い身長計)

6-003

#### Nアイデアル 新生児・乳幼児身長計 M-1000L

¥180,000

- 身長の測定範囲が広いので乳幼児までの身長が測定できます。  
また、簡単な診察・処置もできます。
- 児をテーブルの任意の場所に寝かせたままでも、左右のカーソルを動かして身長を測定することができます。
- 備え付けのテーブルの上におくだけで使用でき、大変便利です。

## ■仕様

身長計／測定範囲…40～90cm、2mm間隔  
 材質／ベット部…ABS樹脂成品  
           身長計…メタクリル樹脂  
 寸法／ベット部…W104×D60×H12cm  
           マットレス…96×44cm  
 付属品…ウレタンマットレス 1枚



6-004

#### Nアイデアル 新生児身長計 300L

¥60,000

- 付属のカーソルを動かすだけで、手軽に簡単に新生児の身長測定ができます。
- 軽いので、取り扱い易く洗浄も容易にできます。

## ■仕様

身長計／測定範囲…4～75cm、2mm間隔目盛り  
 寸法／外寸法…L90×W34×H10.5cm  
 材質…ABS樹脂  
 付属品…カーソル 1個